

**DISPOSITIVO MEDICO
CUSCINO ANTIDECUBITO
GEL FLUIDO AD ALTA VISCOSITA'
GEL250BA e GEL250BA SOFT
ISTRUZIONI D'USO E MANUTENZIONE**

REVISIONE n°2



ALLEN CHIMICA s.r.l.

Alen Chimica s.r.l. – Via del Lavoro, 4 – VIGONZA (PD)

Tel. 049 8933638 – Fax 049 8952000

E-mail: info@alenchimica.com

DATA DI REVISIONE: 20/04/2021



DESCRIZIONE GENERALE DEL PRODOTTO

Il cuscino antidecubito in gel fluido ad alta viscosità GEL250BA è costituito da una sacca in poliuretano termoplastico saldato in H.F. La sacca interna è stata progettata con apposite saldature in H.F. per evitare che il fluido interno, durante l'utilizzo, vada posizionarsi maggiormente nei punti nei quali non è richiesta la sua funzione. All'interno della sacca è contenuto gel fluido. La sacca poggia su una base in poliuretano espanso per aumentare la stabilità e la distribuzione delle pressioni e il comfort del paziente.

La fodera è in PU con cerniera.


E' disponibile una versione GEL250BA soft con uno strato di poliuretano memory da 2 cm. La fodera è in PU con cerniera.

INFORMAZIONI GENERALI SUI CUSCINI ANTIDECUBITO

La formazione di piaghe da decubito è dovuta principalmente a una prolungata immobilità durante la degenza a letto e inabilità del paziente, creando persistenti pressioni a livello di cute in corrispondenza delle prominenze ossee. L'utilizzo del cuscino antidecubito che va a diminuire l'intensità di queste pressioni deve essere associato, per una corretta prevenzione della formazione di piaghe da decubito, a un cambio di posizione ogni 2/3 ore, sollevando il paziente e non trascinandolo per evitare attriti e sfregamenti. Si ricorda, infine, di controllare l'integrità cutanea mantenendola asciutta, pulita e idratata.

ISTRUZIONI DI INSTALLAZIONE

Posizionare il cuscino sul sedile facendo attenzione a rispettare la posizione corretta: la cerniera deve essere posizionata nella parte inferiore e verso lo schienale del sedile. La sacca interna al momento dell'acquisto è già posizionata correttamente.

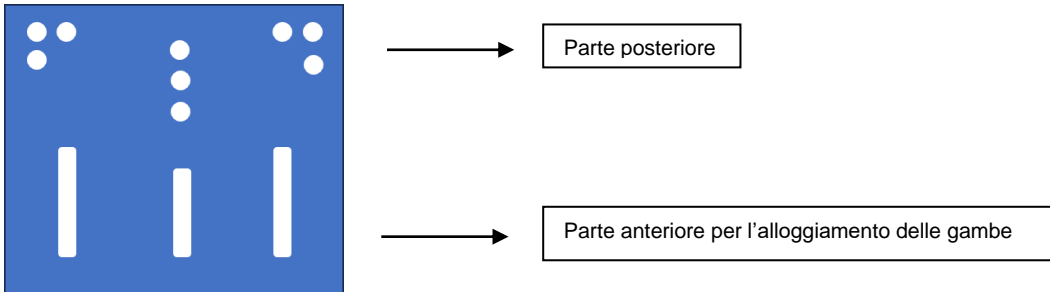

Nell'etichetta è presente la dicitura "parte posteriore" per facilitare l'installazione.

AVVERTENZE E MODALITA' D'USO

- Utilizzare il dispositivo sempre con la fodera in dotazione.
- Non forare la sacca
- Non esporre il cuscino a temperatura continua superiore ai 40°C.
- Non ingerire parti del dispositivo
- Utilizzare lontano da fiamme libere e fonti di calore
- Il prodotto non è monouso tuttavia si consiglia di far utilizzare il dispositivo ad un solo paziente.
- Per un corretto utilizzo il dispositivo deve essere sempre tenuto integro in tutte le sue parti, in caso di lavaggio, le parti che lo compongono devono essere montate come in origine.
- Una eventuale rottura o sfaldamento della sacca contenuta all'interno, pone fine all'effetto antidecubito del dispositivo stesso.
- La sostituzione di eventuali parti che compongono questo dispositivo con altri non originali, esonera la casa costruttrice da ogni eventuale responsabilità.
- In caso di rottura della sacca, se il contenuto viene a contatto con il paziente, si consiglia di eliminare tutto ciò che è entrato in contatto in quanto il gel è di difficile rimozione.
- L'utilizzo del presente dispositivo è indicato per pesi sino a 100 kg. Si sconsiglia l'uso per pazienti di peso superiore.
- Mantenere il dispositivo sempre in posizione orizzontale per evitare che il gel si accumuli solo da una parte.
- Il dispositivo contiene piccole parti che possono essere ingerite o inalate causando soffocamento. Si richiede una supervisione da parte di un adulto.
- Gli utenti con disabilità visive possono consultare le "istruzioni d'uso e manutenzione" del dispositivo sul sito www.alenchimica.com oppure richiedere le istruzioni in formato digitale al seguente indirizzo: commerciale@alenchimica.com

Si raccomanda di segnalare ad Alen Chimica Srl e all'autorità nazionale competente qualsiasi incidente grave verificatosi in relazione al dispositivo.

ISTRUZIONI DI LAVAGGIO E PULITURA

- per la pulizia non è necessario lo smontaggio del dispositivo: la fodera è impermeabile.
La fodera del dispositivo può essere lavata passando leggermente un panno umido con sapone neutro sulla superficie a temperatura non superiore a 30°C e lasciare asciugare.
- La fodera può essere lavata in lavatrice a 60°
- Lavare solo la fodera
- Non stirare
- Non usare altri solventi o detergenti
- Non candeggiare
- Asciugare all'aria lontano da fonti di calore
- Non lavare in autoclave
- Non centrifugare, strizzare ne stirare.
- Può essere pulita con sostanze antibatteriche passando leggermente un panno sulla superficie.
- Non strofinare energicamente sulla superficie

Raccomandiamo l'acquisto di una seconda fodera da usare come ricambio di quella in dotazione per evitare l'uso del cuscino senza fodera.

SPECIFICHE DI CONSERVAZIONE E MANIPOLAZIONE

- Il dispositivo può essere utilizzato come un normale cuscino d'appoggio.
- Conservare in luogo asciutto.
- Il dispositivo deve essere conservato e usato esclusivamente in posizione orizzontale

EVENTUALI EFFETTI COLLATERALI NON DESIDERATI

Non si è a conoscenza di effetti collaterali.

INFORMAZIONI SULLO SMALTIMENTO

Lo smaltimento del dispositivo deve essere effettuato come un normale rifiuto non tossico, nell'ambito delle leggi che lo regolamentano.

CONDIZIONI GENERALI DI GARANZIA

In base alle condizioni di questa garanzia ALLEN CHIMICA s.r.l. garantisce i propri prodotti per un periodo di 2 (due) anni dal momento dell'acquisto. Se durante il periodo di garanzia il cuscino, in normali condizioni di utilizzo, dovesse presentare malfunzionamenti dovuti a difetti di costruzione o relativi materiali della ALLEN CHIMICA s.r.l. potrà procedere alla riparazione e/o alla sostituzione. La garanzia è valida solo se il prodotto da riparare è accompagnato da documento comprovante la data di acquisto il timbro e la firma del rivenditore (scontrino, documento di trasporto, fattura ecc.). E' discrezione di ALLEN CHIMICA s.r.l. la decisione se riparare il prodotto difettoso o procedere alla sua sostituzione. La presente garanzia non copre eventuali danni dovuti alla normale usura o a un utilizzo non appropriato. Inoltre la garanzia non copre danni del prodotto derivanti da eventi fortuiti, modifiche o adattamenti. Qualora si proceda alla riparazione in garanzia il prodotto godrà di un periodo di garanzia pari alla parte residua della garanzia originale, comunque non inferiore a 90 giorni. **Si raccomanda di inviare il prodotto in condizioni igieniche perfette.**

CERTIFICATO DI GARANZIA

DATA DI VENDITA	RIVENDITORE
<hr/>	(TIMBRO E FIRMA)
NUMERO DI LOTTO	
(Reperibile presso l'etichettatura del prodotto) <hr/>	

La presente garanzia non è valida se non è completa in tutte le sue parti e deve accompagnare il dispositivo in caso di difetto.