

**DISPOSITIVI MEDICI
CUSCINI ANTIDECUBITO
VISCOSEAT E VISCOSEAT EVO
ISTRUZIONI D'USO E MANUTENZIONE**

REVISIONE n°2



ALEN CHIMICA s.r.l.

Alen Chimica s.r.l. – Via del Lavoro, 4 – VIGONZA (PD)

Tel. 049 8933638 – Fax 049 8952000

E-mail: info@alenchimica.com

DATA DI REVISIONE: 12/04/2021



DESCRIZIONE GENERALE DEL PRODOTTO

Il cuscino antidecubito sagomato è in PU viscoelastico memory. La sagomatura e l'elevata densità unita alla bassa resilienza, offrono un supporto ottimale alla zona lombare, assicurando, allo stesso tempo, un buon sostegno laterale diminuendo le tensioni muscolari. La struttura anatomica oltre a dare maggiore comfort, permette il posizionamento corretto del paziente.


La fodera sia nella parte superiore che inferiore è costituita da P.U. bielastico con pratica cerniera per la eventuale pulizia della fodera. Il viscoseat evo presenta, invece, una fodera in lycra nella parte superiore e tessuto antiscivolo nella parte inferiore con due fasce di velcro utili per l'ancoraggio del cuscino alla superficie di appoggio. Nella parte anteriore è presente una maniglia utile per il posizionamento del cuscino.

INFORMAZIONI GENERALI SUI CUSCINI ANTIDECUBITO

La formazione di piaghe da decubito è dovuta principalmente a una prolungata immobilità durante la degenza a letto e inabilità del paziente, creando persistenti pressioni a livello di cute in corrispondenza delle prominenze ossee. L'utilizzo del cuscino antidecubito che va a diminuire l'intensità di queste pressioni deve essere associato, per una corretta prevenzione della formazione di piaghe da decubito, a un cambio di posizione ogni 2/3 ore, sollevando il paziente e non trascinandolo per evitare attriti e sfregamenti. Si ricorda, infine, di controllare l'integrità cutanea mantenendola asciutta, pulita e idratata.

ISTRUZIONI DI INSTALLAZIONE

Posizionare il cuscino facendo attenzione a rispettare la posizione corretta: nell'etichetta viene indicata la parte posteriore. In caso di smontaggio del dispositivo inserire il cuscino nella fodera rispettando il posizionamento al momento dell'acquisto.

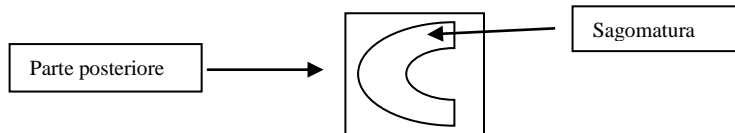

Nel viscoseat evo la maniglia deve essere posizionata anteriormente.

AVVERTENZE E MODALITA' D'USO

- Utilizzare il cuscino sempre con il fodero in dotazione.
- Una eventuale rottura o sfaldamento del cuscino interno, pone fine all'effetto antidecubito del dispositivo stesso.
- Non esporre il cuscino a temperatura continua superiore ai 40°C.
- Utilizzare lontano da fiamme libere e fonti di calore.
- Il prodotto non è monouso tuttavia si consiglia di far utilizzare il dispositivo ad un solo paziente.
- Per un corretto utilizzo il dispositivo deve essere sempre tenuto integro in tutte le sue parti. In caso di lavaggio, le parti che lo compongono devono essere montate come in origine.
- La sostituzione di eventuali parti che compongono questo dispositivo con altri non originali, esonera la casa costruttrice da ogni eventuale responsabilità.
- Non utilizzare il cuscino privo di fodera in dotazione per evitare che il cuscino possa assorbire eventuali liquidi. In caso di assorbimento il cuscino perde la sua funzione antidecubito. Si sconsiglia l'utilizzo e si consiglia la sostituzione.
- L'utilizzo del presente Dispositivo è indicato per pesi sino a 120 kg. Si sconsiglia l'uso per pazienti di peso superiore.
- Il dispositivo potrebbe ingiallire. Il fenomeno dell'ingiallimento è naturale e non compromette la sua funzione.
- Il dispositivo contiene piccole parti che possono essere ingerite o inalate causando soffocamento. Si richiede la supervisione da parte di un adulto.
- Gli utenti con disabilità visive possono consultare le "istruzioni d'uso e manutenzione" del dispositivo sul sito www.alenchimica.com oppure richiedere le istruzioni in formato digitale al seguente indirizzo: commerciale@alenchimica.com

Si raccomanda di segnalare ad Alen Chimica Srl e all'autorità nazionale competente qualsiasi incidente grave verificatosi in relazione al dispositivo.

ISTRUZIONI DI LAVAGGIO E PULITURA

Viscoseat

- Non è necessario lo smontaggio del dispositivo per la pulizia della fodera in quanto è impermeabile. E' sufficiente passare una spugna insaponata sulla superficie e sciacquare bene con acqua pulita sempre con la spugna.
- In caso si volesse procedere allo smontaggio del dispositivo per procedere al lavaggio della fodera:
 - Lavare il fodero separatamente dal cuscino
 - La fodera può essere lavata in lavatrice a massimo 60°C
 - Non candeggiare
 - Asciugare all'aria lontano da fonti di calore
 - Non lavare in autoclave
 - Non centrifugare, strizzare ne stirare.

Cuscino interno

- non immergere il cuscino in nessun tipo di liquido di lavaggio.
- passare la superficie solo con una pezzuola umida con sapone neutro
- Asciugare all'aria lontano da fonti di calore

Viscoseat evo:

- Non è necessario lo smontaggio del dispositivo per la pulizia della fodera in quanto è impermeabile. E' sufficiente passare una spugna insaponata sulla superficie e sciacquare bene con acqua pulita sempre con la spugna.
- In caso si volesse procedere allo smontaggio del dispositivo seguire le successive indicazioni:

Fodero

- Lavare il fodero separatamente dal cuscino
- La fodera può essere lavata a mano a max 30°C.
- Non usare solventi
- Non candeggiare
- Asciugare all'aria lontano da fonti di calore
- Non lavare in autoclave
- Non centrifugare, strizzare né stirare.

Cuscino interno

- non immergere il cuscino in nessun tipo di liquido di lavaggio.
- passare la superficie solo con una pezzuola umida con sapone neutro
- asciugare all'aria lontano da fonti di calore

Raccomandiamo l'acquisto di una seconda fodera da usare come ricambio di quella in dotazione per evitare l'uso del cuscino senza fodera.

SPECIFICHE DI CONSERVAZIONE E MANIPOLAZIONE

- Il cuscino può essere utilizzato come un normale cuscino d'appoggio.
- Conservare in luogo asciutto

EVENTUALI EFFETTI COLLATERALI NON DESIDERATI

Non si è a conoscenza di effetti collaterali.

INFORMAZIONI SULLO SMALTIMENTO

Lo smaltimento del dispositivo deve essere effettuato come un normale rifiuto non tossico, nell'ambito delle leggi che lo regolamentano.

CONDIZIONI GENERALI DI GARANZIA

In base alle condizioni di questa garanzia ALLEN CHIMICA s.r.l. garantisce i propri prodotti per un periodo di 2 (due) anni dal momento dell'acquisto. Se durante il periodo di garanzia il cuscino, in normali condizioni di utilizzo, dovesse presentare malfunzionamenti dovuti a difetti di costruzione o relativi materiali della ALLEN CHIMICA s.r.l. potrà procedere alla riparazione e/o alla sostituzione. La garanzia è valida solo se il prodotto da riparare è accompagnato da documento comprovante la data di acquisto il timbro e la firma del rivenditore (scontrino, documento di trasporto, fattura ecc.). E' discrezione di ALLEN CHIMICA s.r.l. la decisione se riparare il prodotto difettoso o procedere alla sua sostituzione. La presente garanzia non copre eventuali danni dovuti alla normale usura o a un utilizzo non appropriato. Inoltre la garanzia non copre danni del prodotto derivanti da eventi fortuiti, modifiche o adattamenti. Qualora si proceda alla riparazione in garanzia il prodotto godrà di un periodo di garanzia pari alla parte residua della garanzia originale, comunque non inferiore a 90 giorni. **Si raccomanda di inviare il prodotto in condizioni igieniche perfette**

CERTIFICATO DI GARANZIA

DATA DI VENDITA	RIVENDITORE
<hr/>	(TIMBRO E FIRMA)
NUMERO DI LOTTO	
(Reperibile presso l'etichettatura del prodotto) <hr/>	

La presente garanzia non è valida se non è completa in tutte le sue parti e deve accompagnare il dispositivo in caso di difetto.